



Curapor®

Маркировка

Маркировка медицинского изделия включает в себя следующую информацию:



Обратитесь к инструкции по применению



Стерилизация оксидом этилена



Запрет на повторное применение



Не стерилизовать повторно



Не использовать при повреждении упаковки



Не содержит латекс



Верхняя граница температурного диапазона 25 °C



Беречь от влаги



Не допускать воздействия солнечного света



Код партии



Дата изготовления



Использовать до...



Производитель



Производитель

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.KG,
Westerwaldstrasse 4, 56579, Rengsdorf, Germany / Германия

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Финко»
ООО «Фирма «Финко»
Юр. адрес: Россия, 117042, г. Москва, , ул. Южнобутовская, д. 101, оф. 18
Почтовый адрес: Россия, 127083, г.Москва, а/я 520
Тел./ факс: +7(495)6403455
Адрес электронной почты: info@finco-med.com

4032316
2018-07

Наименование медицинского изделия

Повязки абсорбирующие для поверхностных ран, исполнения: „Curapor“ („Курапор“).

Описание медицинского изделия

Повязки абсорбирующие для поверхностных ран, исполнения: „Curapor“ - это стерильная, эластичная и рентгенопрозрачная повязка с высокой впитываемостью в индивидуальной упаковке, представленная в нескольких размерах (от 7,5 x 5 см до 10 x 34 см., более подробно см. таблицу 1).

Таблица 1.

Размер	Содержимое упаковки (шт.)
7 x 5 см	100
10 x 8 см	50
10 x 15 см	50
10 x 20 см	50
10 x 25 см	50
10 x 30 см	50
10 x 34 см	50
7 x 5 см	5
10 x 8 см	5

Состав медицинского изделия

Curapor состоит из нетканого базового материала - белого 100% полиэстера, полиакрилатного клея, безвредного для кожи (без канифоли и дериватов канифоли), впитывающей подушечки, соприкасающейся непосредственно с раневым ложем, состоящей из абсорбирующего слоя, изготовленного из вискозы, полиэтилена / полипропилена и сетки из полиэтилена. Клейкая сторона покрыта двумя белыми совмещенными силиконизированными бумажными подложками.

Целевое назначение / показания

Повязка Сигарог предназначена для применения на послеоперационных, острых и поверхностных ранах, а также порезах и рваных ранах.

Повязки не предназначены для инвазивного использования. Они накладываются на поврежденную кожу (поверхностные раны, хирургический шов) в пределах впитывающей подушечки. Кожа вокруг раны, на которую накладывается клейкий слой, как правило, не повреждена, но может быть тонкой и чувствительной, например, у пожилых пациентов.

Противопоказания

Известные аллергические реакции на любой компонент продукта.

Способ применения

1. Откройте упаковку, используя отрывные полоски.
2. Удерживая две отгибаемые полоски, равномерно потяните обе половинки бумажной подложки в разные стороны.
3. Наложите впитывающую подушечку изделия на очищенную рану и полностью удалите обе половинки бумажной подложки.
4. Слегка придавите клейкую кромку.

Побочные эффекты

В настоящее время не известны.

Меры предосторожности

Повязки Сигарог предназначены для одноразового использования, повторно не использовать.

Продукт поставляется в стерильной упаковке, перед использованием проверьте целостность и герметичность упаковки.

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

- температура - до +25 °С;
- относительная влажность воздуха - до 60%;

Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от солнечных лучей.

Срок годности

При надлежащем хранении срок годности продукта составляет 5 лет.

Требования к охране окружающей среды

При хранении, транспортировании и применении не приносят вреда окружающей среде.

Утилизация

При повреждении упаковки изделие утилизируется в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами класса А (СанПин 2.1.7.2790-10).

Использованное изделие утилизируется в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами класса Б (СанПин 2.1.7.2790-10).

Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие качества медицинского изделия при соблюдении требований к транспортированию, хранению и применению изделия. По вопросам качества продукции обращайтесь к уполномоченному представителю производителя.