


Cellona® výplň

Strih pre techniku vypodloženia

Zvyčajne sú potrebné dve diagonálne skrátene vrstvy a jedna neskrátene vrstva. V prípade obzvlášť výraznej inverzie/supinácie môžu byť potrebné aj tri diagonálne skrátene vrstvy.

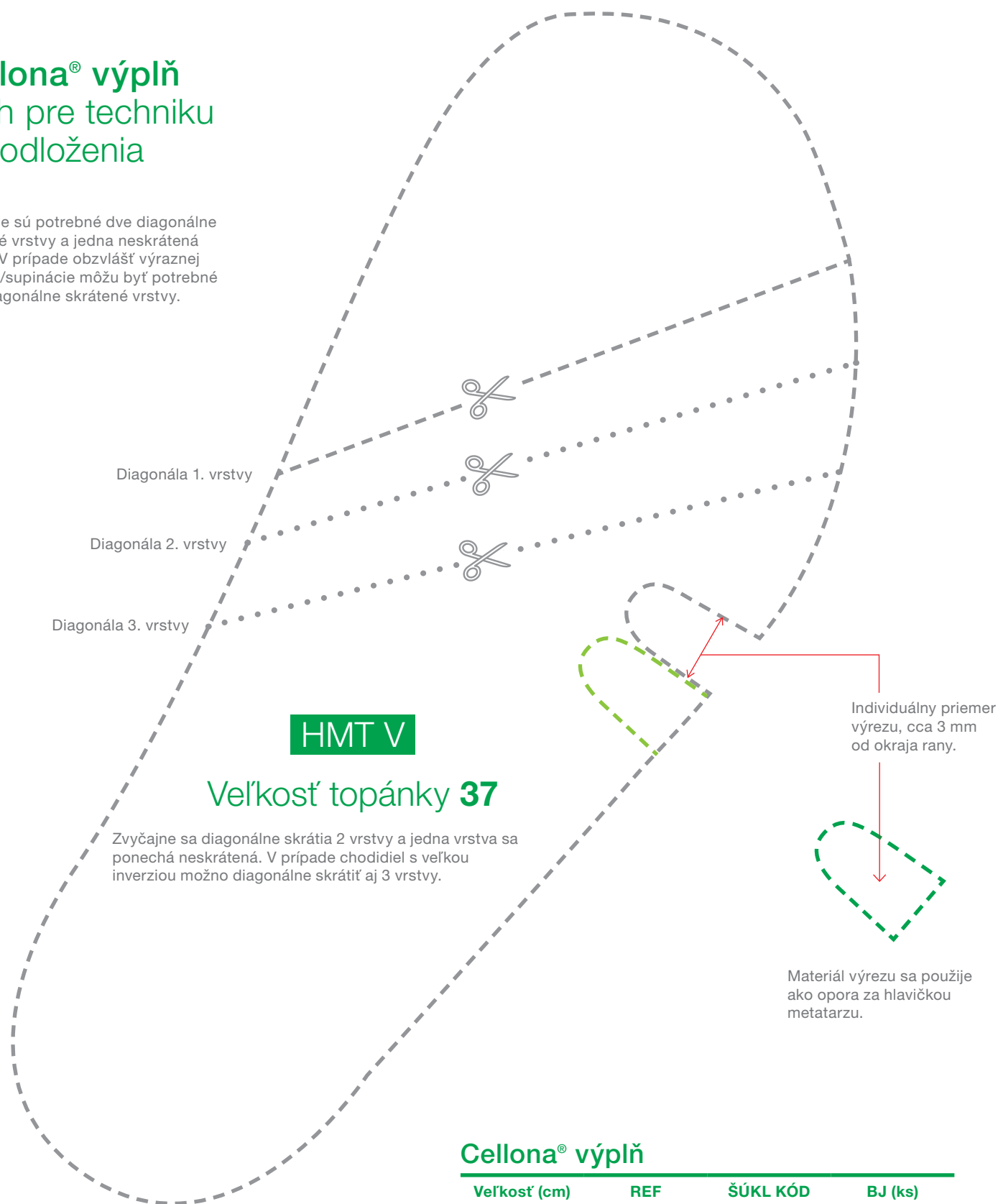

Zvyčajne sa diagonálne skrátia 2 vrstvy a jedna vrstva sa ponechá neskrátene. V prípade chodidiel s veľkou inverziou možno diagonálne skrátiť aj 3 vrstvy.

Individuálny priemer výrezu, cca 3 mm od okraja rany.

Materiál výrezu sa použije ako opora za hlavičku metatarzu.

Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablóna je určená pre pravú nohu.
Pre ľavú nohu sa list otočí.