

## Cellona® výplň

### Strih pre techniku vypodloženia

Zvyčajne sú potrebné dve diagonálne skrátené vrstvy a jedna neskrátená vrstva. V prípade obzvlášť výraznej inverzie/supinácie môžu byť potrebné aj tri diagonálne skrátené vrstvy.

Diagonála 1. vrstvy  
Diagonála 2. vrstvy  
Diagonála 3. vrstvy

**HMT V**

Veľkosť topánky **40**

Zvyčajne sa diagonálne skráti 2 vrstvy a jedna vrstva sa ponechá neskrátená. V prípade chodidiel s veľkou inverziou možno diagonálne skrátiť aj 3 vrstvy.

Individuálny priemer výrezu, cca 3 mm od okraja rany.

Materiál výrezu sa použije ako opora za hlavičku metatarzu.

## Cellona® výplň

| Veľkosť (cm)                    | REF    | ŠÚKL KÓD | BJ (ks) |
|---------------------------------|--------|----------|---------|
| hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku |        |          |         |
| 19 x 38                         | 50 810 | A38743   | 10/60   |

### Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablóna je určená pre pravú nohu.  
Pre ľavú nohu sa list otočí.